



DESTINATAIRES : Tous les employés et médecins du CISSS de Laval
EXPÉDITRICE : Pauline Arnaud, chef de service de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) et endoscopie, par intérim
DATE : Le 22 avril 2020
OBJET : **Récupération et stérilisation des masques N95**

Pour faire suite à la stérilisation des masques N95 et à la pénurie de certaines tailles de masques, nous désirons vous informer que des changements ont été apportés.

Vous pourrez trouver les masques N95 stérilisés et les masques neufs N95 au magasin de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Les masques N95 stérilisés seront distribués en tant que substitut et uniquement en cas de rupture de stock du modèle demandé.

L'algorithme de stérilisation des masques N95 a subi lui aussi quelques changements :

- Les masques N95 peuvent être stérilisés même s'ils ont été utilisés :
 - pour une intervention générant des aérosols avec une visière et/ou un masque de procédure comme protection supplémentaire;
 - avec un usager porteur d'une bactérie multirésistante (le professionnel de la santé ne devra pas toucher son masque avec ses gants),
- Le professionnel de la santé doit vérifier si le masque est déformé et doit faire son test d'étanchéité avant de l'utiliser.

Exemple d'un masque stérilisé :



Nous désirons aussi rappeler que les masques N95 peuvent être utilisés plusieurs fois avant d'être jetés ou stérilisés, et ce, en suivant les conditions suivantes de l'Institut national de santé publique : <https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-control-des-infections>.

Algorithme de désinfection des masques N95 lors de la pandémie de COVID-19

★ Si questions ou problématiques, vous pouvez appeler à l'URDM au 450 668-1010, poste 23755



Quand le professionnel de la santé récupère un nouveau masque N95

Au retrait du N95, il procède à l'inspection sommaire de son masque.
Est-ce qu'il a été :

- Endommagé ou
- Souillé par des gouttelettes ou par une intervention générant des aérosols (si pas de visière) ou
- Souillé par du maquillage.

OUI

Jeter le masque N95 dans un contenant désigné



NON

Déposer le N95 dans le bac dédié

Le bac de masques sera vidé chaque matin par l'URDM

Les masques N95 seront stérilisés au peroxyde d'hydrogène (à basse température)

Les masques stérilisés seront entreposés au magasin comme pour les nouveaux masques N95.

★ Quand vous n'avez plus de masque N95 en stock sur votre unité, passez une commande au service d'approvisionnement.

À la réception des masques, le professionnel de la santé fait son test d'étanchéité avec le masque N95 stérilisé.